



# Gebrauchsanweisung Servoflex nutrition P

## 1. Einleitung

Überleitungsgerät mit Spike und Universaladapter für Sondennahrung in Beuteln und Flaschen, mit Pumpensegment und Aufhängevorrichtung

**Für Ernährungspumpen Servosan® enteral, Clinimed® enteral, Nestle P7000 und Novartis Compat® Standard sowie Schwerkraftapplikation.**

## 2. Zweckbestimmung

Überleitsysteme für enterale Ernährung dienen der Verabreichung von enteraler Ernährung (medizinisch indizierten Ernährungslösungen) mittels Schwerkraft oder Pumpe. Sie stellen die Verbindung zwischen Nahrungsmittelbehälter (Flasche, Container, Beutel) und den speziellen Ernährungssonden her.

## 3. Indikation

Eine enterale Ernährung mittels Überleitsystem ist bei Patienten indiziert, bei denen eine ausreichende orale Nahrungsaufnahme aus medizinischen Gründen (z. B. Schluckstörungen) nicht erfolgen kann und kausaltherapeutisch alle Möglichkeiten einer bedarfsdeckenden oralen Nahrungsaufnahme ausgeschlossen sind (konsumierende Erkrankungen).

## 4. Lieferumfang

- 1 Überleitungsgerät mit Spike, Universaladapter und Pumpensegment
- 1 Flaschenhalter

## 5. Material

Transparenter PVC-Schlauch, Pumpensegment aus Silikon. **Ohne Weichmacher DEHP.**

## 6. Gebrauchsanweisung

- Rollenklemme schließen.
- **Nahrungsbeutel:** Schutzfolie bzw. Verschlusskappe entfernen. Überleitungsgerät fest auf den Beutelanschluss aufschrauben.
- **Nahrungsflasche:** Gegebenenfalls Aufhängevorrichtung über die Flasche ziehen, Flasche öffnen, Universaladapter aufsetzen oder aufdrehen.
- Nahrungsbehälter aufhängen.

Bei **Pumpengebrauch** entsprechend den Anweisungen des Pumpenherstellers verfahren.

- Tropfkammer in die Haltevorrichtung der Pumpe einlegen.
- Rollenklemme öffnen.
- System entlüften. Klemme schließen.
- Silikonschlauch um den Rotor legen. Pumpenadapter in die Brücke einlegen.
- Schlauch in die Schlauchführung legen.
- Anschlussstück Luer-Lock weiblich oder Stufenverbinder an die Sonde anschließen.
- Gewünschte Fördermenge einstellen und Pumpe starten.

Bei **Schwerkraftapplikation**

- Tropfkammer bis zur Hälfte füllen.
- Rollenklemme öffnen und Schlauchsystem mit Nährlösung füllen.
- Rollenklemme schließen.
- Anschlussstück Luer-Lock weiblich oder Stufenverbinder an die Sonde anschließen.
- Rollenklemme öffnen und die gewünschte Tropfenzahl einstellen.

## 7. Anwendungshinweise

- Das Y-Stück dient zum Spülen der Ernährungssonde.
- Der Stufenadapter kann entfernt werden. Es steht dann ein Anschluss Luer-Lock weiblich zur Verfügung.
- Überleitungsgerät bei Bedarf, spätestens jedoch nach 24 Stunden, wechseln.
- **Zur intravenösen Infusion nicht geeignet.**
- **Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung.**
- **Steril nur bei unbeschädigter Verpackung.**

CE 0197



STERILE EO

PZN



Pmax:  
150 kPa (22psi)

REF

22350

**servōna**  
Uns verbindet Gesundheit.

**Servona GmbH**

Biberweg 24-26 | 53842 Troisdorf

Tel. 0 22 41.93 22-0

Fax 0 22 41.93 22-277

info@servona.de | www.servona.de