



## Überleitsystem Schwerkraft



**Schwerkraft-Überleitungsgerät mit Spike und Universaladapter für Sondennahrung in Beuteln und Flaschen, dicklumig, mit Flaschenhalter.**

Für alle Weithalsflaschen, Kronkorkenflaschen, Plastikflaschen und alle vorgefüllten Beutel.



### Gebrauchsanweisung

- Rollenklemme schließen.
- Nahrungsbeutel: Schutzfolie bzw. Verschlusskappe entfernen.
- Nahrungsflasche: Gegebenenfalls Flaschenhalter über die Flasche ziehen, Flasche öffnen, Universaladapter aufsetzen oder aufdrehen.
- Überleitungsgerät fest auf den Beutelanschluss oder den Universaladapter aufschrauben.
- Nahrungsbehälter aufhängen und Tropfkammer bis zur Hälfte füllen.
- Rollenklemme öffnen und Schlauchsystem mit Nährlösung füllen.
- Rollenklemme schließen.
- Anschlussstück Luer-Lock weiblich oder Stufenverbinder an die Sonde anschließen.
- Rollenklemme öffnen und die gewünschte Tropfenzahl einstellen.

### Anwendungshinweise

- Das Y-Stück dient zum Spülen der Ernährungssonde.
- Der Stufenadapter kann entfernt werden. Es steht dann ein Anschluss Luer-Lock weiblich zur Verfügung.
- Dieses Überleitungsgerät ist ausschließlich zur Schwerkraftapplikation geeignet.
- Überleitungsgerät bei Bedarf, spätestens jedoch nach 24 Stunden, wechseln.
- **Zur intravenösen Infusion nicht geeignet.**
- **Nicht an Ernährungspumpen koppeln.**
- **Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung.**

### Bestellinformationen

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.
Servoflex nutrition G (Überleitsystem Schwerkraft)	1	22351

