



## Überleitsystem Pumpe



Überleitungsgerät mit Spike und Universaladapter für Sondennahrung in Beuteln und Flaschen, mit Pumpensegment und Flaschenhalter. Für Ernährungspumpen Servosan® enteral, Nestle P7000 und Novartis Compat® Standard sowie Schwerkraftapplikation. Passend an alle: Weithalsflaschen, Kronkorkenflaschen, Plastikflaschen und alle vorgefüllten Beutel.



### Gebrauchsanweisung

- Rollenklemme schließen.
- *Nahrungsbeutel*: Schutzfolie bzw. Verschlusskappe entfernen.  
*Nahrungsflasche*: Gegebenenfalls Flaschenhalter über die Flasche ziehen, Flasche öffnen, Universaladapter aufsetzen oder aufdrehen.
- Überleitungsgerät fest auf den Beutelanschluss oder den Universaladapter aufschrauben.
- Nahrungsbehälter aufhängen und obere Tropfkammer bis zur Hälfte füllen.

Bei Pumpengebrauch entsprechend den Anweisungen des Pumpenherstellers verfahren.

- Pumpensegment in die Haltevorrichtung der Pumpe einlegen.
- Rollenklemme öffnen.
- System entlüften.
- Anschlussstück Luer-Lock weiblich oder Stufenverbinder an die Sonde anschließen.
- Gewünschte Fördermenge einstellen und Pumpe starten.

Bei Schwerkraftapplikation

- Rollenklemme öffnen und Schlauchsystem mit Nährlösung füllen.
- Rollenklemme schließen.
- Anschlussstück Luer-Lock weiblich oder Stufenverbinder an die Sonde anschließen.
- Rollenklemme öffnen und die gewünschte Tropfenzahl einstellen.

### Anwendungshinweise

- Das Y-Stück dient zum Spülen der Ernährungssonde.
- Der Stufenadapter kann entfernt werden. Es steht dann ein Anschluss Luer-Lock weiblich zur Verfügung.
- Überleitungsgerät bei Bedarf, spätestens jedoch nach 24 Stunden, wechseln.
- **Zur intravenösen Infusion nicht geeignet.**
- **Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung.**



### Bestellinformationen

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.
Servoflex nutrition P (Überleitsystem Pumpe)	1	22350