



Ernährungspumpe



Die Servosan enteral ist eine zuverlässige, zeitsparende enterale Ernährungspumpe, ausschließlich für die Applikation von enteraler Sondenkost.

Technische Daten

Geräteart: Enterale Ernährungspumpe
 Arbeitsprinzip: Rollenpumpe
 Förderrate: 5 – 295 ml/h, einstellbar in 1-ml-Schritten
 Fördermenge: Volumenvorwahl einstellbar von 1 – 2.000 ml in 1-ml-Schritten sowie 2.000 – 9.995 ml in 5-ml-Schritten
 Fördergenauigkeit: Abweichung max. +/- 10 % der eingestellten Förderrate
 Okklusionsdruck: Abschalt-Überdruck max. 1 bar (1,013 x 10⁵ Pa)
 Abmessungen: H x B x T = 19,0 x 22,9 x 13,2 cm
 Gewicht: 2,3 kg
 Gehäusematerial: Gehäuse aus Polycarbonat
 Betriebsumgebung: +16 bis +40°C, 10 bis 90 % rel. Luftfeuchtigkeit
 Transport/Lagerung: -10 bis +50°C, 10 bis 90 % rel. Luftfeuchtigkeit
 Akku: 1,2 Ah, gasdicht, Bleisäure
 Ladezeit 10 h (bei kompletter Entladung)
 Betriebszeit: 6 h bei 125 ml/h
 Stromversorgung: 220 – 240 V~, 50 Hz ± 5 %, 12 VA
 Schutz/Klassifikation: Schutzklasse II (Notstromumschaltung)
 Feuchtigkeitsschutz: nach IEC 60529: IP 41
 Elektrische Sicherheit: Gerät stimmt überein mit IEC 60601-1, IEC 60601-1-4
 Entsorgung: durch den Hersteller nach dem deutschen Elektro- u. Elektronikgerätesgesetz

Eigenschaften

- Aufzeichnung des Gesamtvolumens
- Klare, große geteilte Displayanzeige
- Mit der Lösch taste können alle Anzeigen mit einer, einig Sekunden dauernden Berührung gelöscht werden – mit Ausnahme des Gesamtvolumens
- Der Benutzer wird gewarnt, wenn der Ladezustand der Batterie niedrig, der Nahrungsbehälter leer oder die Sonde verstopft ist. Er wird ebenfalls darauf hingewiesen, wenn die eingestellte Dosis gefördert wurde oder die Förderrate der Sondenkost zu hoch ist
- Das glatte Kunststoffgehäuse kann mit einem fussselfreien-befeuchteten Tuch mit Trinkwasser leicht gereinigt werden
- Der elektronische Speicher wird bei Stromausfall oder beim Abschalten der Einheit nicht gelöscht, so dass die voreingestellten Daten und die bereits applizierte Menge nicht verloren gehen
- **Bitte die Gebrauchsanweisung beachten**

Bestellinformationen

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.
Servosan® enteral Ernährungspumpe	1	22768
Servoflex nutrition P (Überleitsystem Pumpe)	1	22350

Servona GmbH

Biberweg 24-26 | 53842 Troisdorf
 Tel. 0 22 41.93 22-0 | Fax 0 22 41.93 22-277
 info@servona.de | www.servona.de